

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) IgG / IgM 抗体検出キット 50テスト/キット

*新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の診断を目的としたものではありません

ヒト血清、血漿、あるいは全血中の新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) に対する IgG 及び IgM*抗体を簡便な操作で検出することができます。


※COVID-19において一般的にIgGはIgMより検出感度が優れていることも報告されています。

(Derrick Crook, medRxiv 2020; 04.15.20066407, doi: <https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20066407>)


- ① 10分で測定結果の判定が可能
- ② 目視判定のため専用の測定機器は不要
- ③ 血清、血漿、全血のいずれの検体でも測定可能

操作方法

1. 冷蔵で保管したテストカートリッジおよび展開液は測定の 15 分前には冷蔵庫から取り出し、測定温度 (18 ~ 28 °C) に戻してください。以降の操作は 18 ~ 28 °C で実施してください。
2. パウチからテストカートリッジを取り出し、水平な台の上においてください。

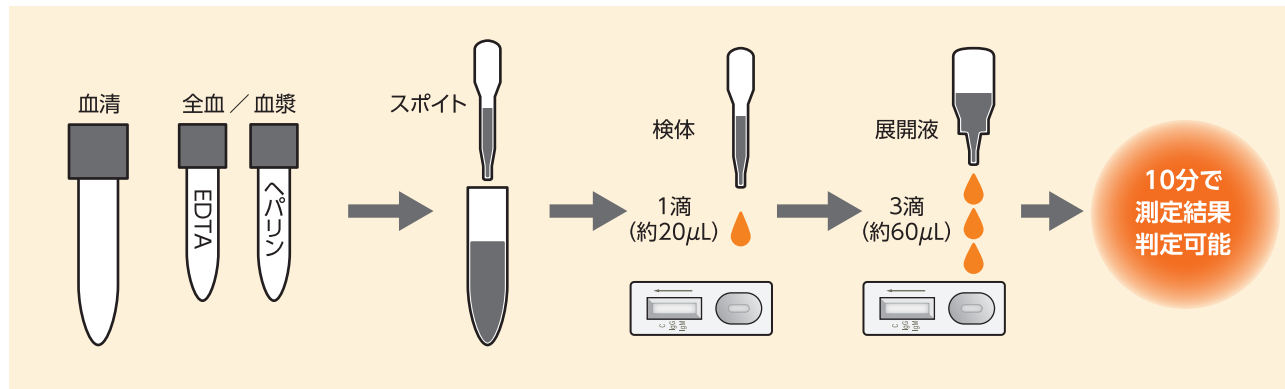

測定結果の判定方法

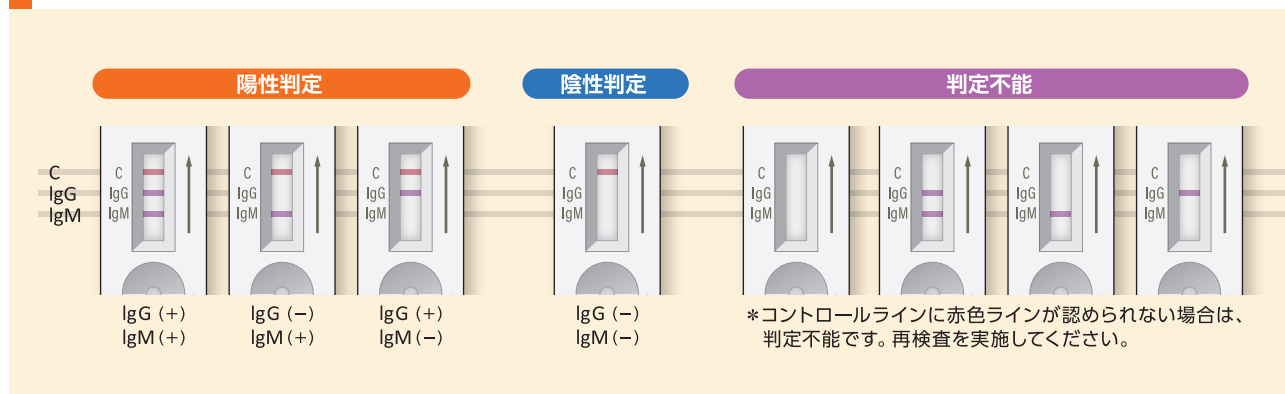

使用上の注意事項

1. 本試薬をご使用になる際には、添付の使用説明書をよく読み、記載された方法に従って使用してください。
2. 本試薬は、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染の臨床的診断を下す目的では使用できません。
3. 誤った検体採取や保存、操作を行った場合、正しい測定結果が得られない可能性があります。
4. 高温・直射日光は避けてください。
5. 使用後の本試薬構成成分や検体は感染性のあるものとして、各施設のバイオハザードの取扱いに従って廃棄してください。

製品概要

測定原理	イムノクロマト法
製品名	新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）IgG/IgM 抗体検出キット
使用目的	ヒト血清、血漿、あるいは全血中※の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に対する IgG 及び IgM 抗体を検出する。
判定時間	展開液滴下後、10 分
貯蔵方法	4～30℃で保存 *テストカートリッジは、開封後、1 時間以内に使用してください。 *展開液は、開封後は 2～8℃で保管し、1 か月以内に使用してください。
使用期限	外箱に表示

※全血を検体とする場合は、血球成分の影響により IgG および IgM 抗体の存在量が約半分となるため、感度不足となる可能性があります。

キットの内容




(注) 写真の色調は現物と多少異なる場合があります。
また、アルミ包装も変更される場合があります。

● 包装単位：50 テスト / キット

内容	入り目
テストカートリッジ	アルミパウチ × 50 個
展開液	5mL × 4 本
スポイト	50 本

● 展開液の開け方

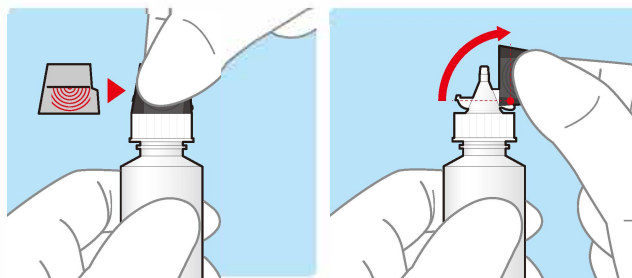

- ① 黒色キャップ両側面の円弧マークをしっかりと押してください。
- ② ①の状態のまま黒色キャップの片側を引き上げて開けてください。
(キャップは片側しか外れません)

- ★ 本試薬は研究用試薬です。体外診断用医薬品として承認されたものではありません。
- ★ 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染の臨床的診断を下す目的では使用できません。

MRT 株式会社

〒150-0041
東京都渋谷区神南1-18-2 フレーム神南坂3階
TEL : 03-6861-4105 FAX : 03-6415-5282
Mail : service@medrt.com

発売
シオノギ製薬
大阪市中央区道修町 3-1-8
医薬情報センター TEL 0120-956-734

輸入元：株式会社マイクロブラッドサイエンス
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-8

製造元：Nanjing Vazyme Medical Technology Co., LTD.
(中華人民共和国)